

Optimox

Gassparare för mobil oxygenterapi

Produktinformation

Gassparare Optimox används tillsammans med mobila oxygenterapiutrustningar där den ger patienten möjlighet till en längre sammanhängande utevistelse utan flaskbyte. Eftersom man spar gas, minskar också kostnaderna för behandling.

Optimox känner av patientens andning och öppnar för oxygen bara då patienten andas in. Vid utandning är ventilen stängd, ingen gas förbrukas i onödan. Optimox kan användas till nästan alla mobila oxygenutrustningar, oberoende av fabrikat. Doseringen regleras med en enda ratt. Dosen är inställbar mellan 0,5 och 4,5 lpm (8-75 ml/andetag) motsvarande kontinuerligt flöde. Vid varje andetag får patienten en förutbestämd mängd oxygen. Det är därför lätt att justera patientens dosering i efterhand. Optimox följer patientens andningsfrekvens, minutvolymen oxygen blir större vid ansträngning än vid vila.

Att andas med näsan är en viktig förutsättning för att all oxygenbehandling med sparventil och näsgrimpa ska bli effektiv. Optimox känner av utebliven näsandning och påminner patienten om det. Optimox har vanlig slangsockel som utlopp och passar till flertalet näsgrimmor.



Tekniska data

Matning el:

4st batterier typ LR6 1,5V

Matning gas:

3,5 bar matningstryck via speciellt slangset

Dimensioner:

BxDxH 95x160x33mm

Vikt:

385 gram med batterier

Benämning:

Optimox inkl slangset (exkl reduceringsventil för gasflaska)

Optimox KI inkl slangset (för flaska med integrerad regulator)

Artikelnr:

430701

430711