

Selectaflo PR

Flaskregulator med flödesväljare för andningsoxygen

Produktinformation

Selectaflo PR är en kombinerad tryckregulator och flödesväljare. Regulatoren är av 2-steps kolvtyp. Det innebär att regulatoren reducerar flasktrycket i två steg, från 200 bar till ca 4 bar i 1:a steget och till ca 1 bar i 2:a steget. Detta medför en helt jämn flödeskurva jämfört med en traditionell 1:stegs regulator där flödet varierar beroende på flasktrycket. Selectaflo PR finns i 3 flödesområden. 0-3 L/min (0-0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3), 0-6 l/min (0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6) och 0-15 L/min (0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15). Flödet är distinkt med fasta klicklägen. Inställt värde kan avläsas från två håll, framifrån och ovanifrån. Selectaflo PR kan därför med fördel användas i transport och akutsituationer t.ex. olika typer av väskor då den även är lägesoberoende. Selectaflo PR kan via sina två lågtrycksutgångar utrustas med ett extra gasuttag och en enklare ejektorsug. Utloppsanslutningen är försedd med slangsockel. Anslutningen för befuktarflaska är 9/16" vilket passar de flesta på marknaden förekommande befuktare. Selectaflo PR kan fås med 2 alternativa inloppsanslutningar. Handgreppsanslutning och 6-kantsanslutning (uppges vid beställning).



Tekniska data

Max inloppstryck:	200 Bar
Utloppstryck	
lågtrycksutgång:	4,2 bar
Flödesområde:	0,25-3l/min 0,5-6l/min 1-15 l/min
Flöde:	
Lågtrycksutgång:	>200 l/min
Mått LxB:	115x50 mm (exkl. inlopp och gasuttag)
Vikt:	875 gram exkl. ansl.
Användnings- temperatur:	-20°C - +60°C
Utloppsansl.:	9/16"

Benämning:

Selectaflo PR 0,25-3 l/min, exklusive inloppsanslutning
Selectaflo PR 0,5-6 l/min, exklusive inloppsanslutning
Selectaflo PR 1-15 l/min, exklusive inloppsanslutning
Inloppsanslutning handgreppsanslutning
Inloppsanslutning 6-kantsanslutning
Gasuttag O₂
Ejektorsug Aspal
Ljuddämpare Aspal

Artikelnr:

430510
430520
430530
431903
431905
411675
440001
440009

Huvudkontor
Adress

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243-23 05 07

Tel
Fax

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46 (0)40-47 27 47

Email info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901