

NewLife-70

Analgesiutrustning för förlossningsavdelningen

NewLife-70 är en komplett analgesiutrustning speciellt framtagen för smärtlindring inom förlossningsvården. NewLife-70 består av en mixer, en integrerad demandventil, ett NewLife slangset som ansluts mot de väggmonterade Lustgas och Oxygenuttagen i salen. På NewLife-70 kan man optiskt avläsa att gas är ansluten via en gasindikator för respektive gas som lyser grönt när gas är ansluten. Flushfunktion kan aktiveras av personal och utrustningen ger då 100% oxygen intermittert alt. kontinuerligt. För att inte behöva låsa upp vårdpersonal vid flushknapp finns det även möjlighet att ställa in 100% oxygen via inställningsvredet. Mamman får då ren oxygen vid varje inandning genom masken.



NewLife-70 ger gasblandning upp till 70% Lustgas (30% oxygen).

Av säkerhets, och miljömässiga skäl, ger NewLife-70 endast gas när patienten andas in via andningsmasken (andningsmaskmask ingår ej, vanligtvis används dubbelmask vid förlossning). Med denna säkerhetsfunktion släpps ingen brandunderhållande oxygen eller hälsovådlig lustgas okontrollerat ut i rummet där patient och personal vistas.

Systemuppkoppling

NewLife-70 ansluts till sjukhusets gasuttag för oxygen och lustgas. Inkoppling till respektive gasuttag sker med medföljande kompletta NewLife-70 slangset. Därefter ansluts patientslangset 458020 (ingår ej, offereras separat).

Patientslangset 458020 har inandningsslang med 22 mm F-anslutning och denna ansluts till NewLife-70.

Utandningsslangen har även den 22 mm F-anslutning och denna ansluts till Medicvent utsugssystem.

Slangsetet har mot dubbelmasken en Y-koppling med 15 mm M-anslutning.

Vår patientslang 458020 är utprovad ihop med NewLife-70, genom att använda detta slangset som är av engångstyp, garanterar vi att NewLife-70 fungerar som avsett.

Funktionsbeskrivning



Operatören ställer in NewLife-70 för önskad lustgaskoncentration 0–70%.

Vid behov av smärtlindring, andas patienten in via sin andningsmask som denne håller i handen (patientstyrd analgesi).

Det undertryck som skapas vid patientens inandning genom andningsmasken öppnar NewLife-70's demandventil.

Den förinställda gasblandningen bestående av en smärtlindrande mix av lustgas och oxygen administreras nu till patienten (under hela inandningsfasen). Skulle någon gas försvinna utöses ett akustiskt larm, optiskt kan man på NewLife-70, via gasindikatorer (som är gröna då gas är kopplad), avläsa vilken gas som försvunnit och därmed orsakat larmet.

Slangset 458020 (ingår ej offereras separat) 1-patient, expanderbart 300 cm
Systemuppkoppling (Medicvent slang & utsugskomponenter ingår ej)

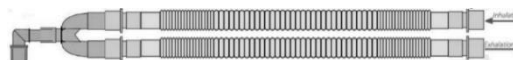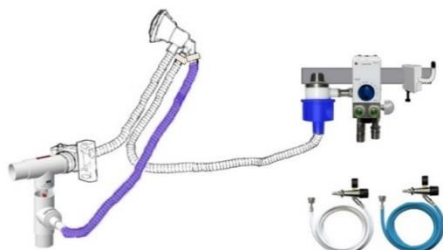

Artikelnummer

458000	NewLife-70	Levereras med anslutningsslang för oxygen och lustgas.
458010	Maskhållare	Maskhållare som monteras på IVA skena med klove (ingår i 458000)
458020	Slangset	Slangset 22F-22F-15M passar bl.a. Medicvent dubbelmask (ingår ej) Säljes i förpackning om 15stycken.

För ytterligare information, eller önskad provuppställning, kontakta vår marknadsavdelning på nedan tel.nr.

Huvudkontor

Adress

Tel

Fax

E-mail

Bankgiro

Postgiro

VAT

Aspira Medical AB

Duvnäs

781 90 Borlänge

0243 – 23 05 00

0243 – 23 05 07

info@aspira.se

5367-4990

637 39 60 – 1

SE556447153901

Försäljningskontor

Aspira Medical AB

Duvnäs

781 90 Borlänge

0243 – 23 05 00

info@aspira.se

Hemsida: www.aspira.se

www.babyskotbord.se

Försäljningskontor

Aspira Medical AB

Box 41

239 21 Skanör

040 – 47 57 98

info@aspira.se